

DoMyDay

Kom hurtigt i gang med DoMyDay



Forslag til brug af DoMyDay

DoMyDay har en meget fleksibel brugerflade, som kan tilpasses brugeren efter behov.

For borgere som lider af sygdommen demens, kan det være udfordrende at bruge en telefon, og som sygdommen fremskrider, kan der være flere funktioner som brugeren ikke kan bruge. Derfor er DoMyDay opbygget således at der kan fjernes funktioner og smartphonen kan blive mere simpel.

Fx. Kan kalenderen i starten af sygdommen indeholde flere dage, og mulighed for at brugeren selv kan oprette begivenheder. Eftersom sygdommen fremskrider, kan kalenderen ændres til kun at vise i dag og i morgen, og at brugeren ikke selv skal kunne oprette begivenheder. GPS tracking kan slås til, hvis brugeren får problemer med at blive væk.

Hvis DoMyDay på den anden side skal bruges til en bruger som skal rehabiliteres, så kan brugerfladen gøres meget simpel, og som brugeren forbedre sig og kan overskue flere funktioner, så kan DoMyDay udvides.

Fx. Kan brugeren starte ud med kun at have en simpel kalender i menuen, hvor der her kan gentages begivenheder såsom "Tage piller", hvis det kun ønskes at DoMyDay skal bruges til påmindelser. Eftersom brugeren bliver bedre og ønsker flere funktioner som fx telefon, beskeder, så kan disse indsættes efter ønsket fra brugeren.

Klargøring af DoMyDay

Start med at indsætte Micro simkort i telefonens højre side. Simkortholderen tages ud med den medfølgende klips, og simkortet placeres i holderen. Holderen skubbes tilbage i telefonen.



Tænd telefonen ved at holde den øverste knap i højre side inde. Vent nu på at telefonen er startet op og forsiden bliver vist. For at opsætte Wi-Fi forbindelse , trykkes der 4 gange hurtigt på uret. Skriv **wifi** i brugernavn og **domyday** i adgangskode og tryk accepter. Vælg netværk og skriv adgangskode. Forlad Wi-Fi indstillinger ved at trykke på tilbage knappen. ↶

Der trykkes igen 4 gange hurtigt på uret. Denne gang indtastes brugernavn og adgangskode.

Funktioner i DoMyDay



Hurtig opsætning af DoMyDay

Start med at trykke 4 gange hurtigt på uret.

- Indtast brugernavn og adgangskode.
- Husk at krydse redigeringsstilstand af.

Under brugere har du mulighed for at ændre brugerinformation.

- Udfyld oplysningerne på brugeren.

Under funktion kontakter er det muligt at ligge nye kontakter ind på telefonen.

- Tryk på + for at oprette ny kontakt.
- For at kontakten er synlig på mobilen skal der være flueben i boksen.
- Tryk på gem kontakt, når alt er udfyldt.

Under opgave funktionen er det muligt at:

- Trykke på + øverst til højre for at oprette ny opgave.
- Indsætte billede og navn på opgaven.
- Indsætte underopgave og evt. tilføje billede, video eller lydfil.
- Trykke på ⋮ inde i en opgave for at tilknytte tag til NFC nøglekort.

Opret begivenhed i kalenderen.

- Vælg dag og tryk på + for at tilføje begivenhed.
- Tryk på ⋮ for at ligge en opgave ind i en begivenhed.
- Tryk på + for at tilføje en kontakt til en begivenhed.
- Angiv start og slut tidspunkt mm.

Under Billeder kan man tilføje album til billederne.

- Opret album ved at trykke på +
- Hvis albummet ønskes synlig på listen skal der være flueben.

Under beskeder er det muligt at:

- Trykke på ⋮ for at tilføje brugerdefineret besked og svar.
- Trykke på ⋮ for at tilføje find mig besked og svar.
- Trykke på + for at oprette en besked som brugeren kan vælge.
- Trykke på **Tilføj svar** for at oprette et svar som brugeren kan sende.

Under funktioner er det muligt at:

- Ændre forside funktionernes rækkefølge ved at holde inde på den ønskede funktion. Flyt fingeren op og ned for at flytte funktionen.
- Fjerne et flueben så den valgte funktion ikke bliver vist.
- Kun at vise i dag og i morgen i kalenderen.
- Bruger kan selv tilføje begivenhed i kalenderen.

Under telefon indstillinger er det muligt at:

- Begrænse opkald til mobilen til kun at være opkald fra kontakter.
- Besvare opkald automatisk.
- Acceptere GPS anmodninger fra kontakter.
- Sende besked til kontakter hvis batteriet på mobilen er lavt.
- Sende besked til kontakter hvis opgave/begivenhed ikke udføres.

De øvrige funktioner giver mulighed for følgende:

- Indstillinger til lydstyrke for ringetone.
- Indstillinger til lydstyrke for tale.
- En detaljeret hændelseslog.
- Indstillinger for dato og tid.
- Kamera funktion.



Tele Call ApS, Svovlhatten 3, 5220 Odense SØ
info@telecall.dk (+45) 21 123 456
www.DoMyDay.dk